

**Jelzőtorony**

LC207

**Általános információk**

- használata egyszerű: állítsa a készüléket a felvétel üzemmódba, majd nyomja meg a felvétel gombot és rögzítse az üzenetét (maximum 20s)
- állítható hangerő szabályozó és beépített mikrofon
- audio bemenet, hogy CD-ről/MP3-ról vagy a számítógépről lehessen hanganyagot rögzíteni
- mérete (a legszélesebb pontokon): 8,5 cm × 5,8 cm × 5 cm
- a termékhez tartozik 2 db AA elem

**Tájékoztató**

Helyezze a jelzőtoronyt maga elé úgy, hogy a készülék eleje legyen ön felé. A készülék elején a tetejéhez közelebb egy nagy kört fog érezni, amiben két másik kör is található. Ez a három körből álló rész a hangfal. A kör alatt található egy kicsi gomb, ami a felvétel/lejátszás gomb. Alatta található egy kör alakú mélyedés, amiben egy apró lyuk található, ami a mozgásérzékelő.

**A jelzőtorony használata****Üzenet rögzítése a belső mikrofon használatával**

1. Állítsa a hangerőt a maximumra: a készülék hátulján jobb oldalon található egy vízszintesen csíkozott tekerő (a hangerő szabályozó), amit tekerjen lefelé, míg megakad. Ezek után állítsa a készülék bal felső sarkában található csúszkát a REC (felvétel) pozícióba, ami a bal sarok (a jobb sarok a lejátszás állás).
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék elején található felvétel gombot. (A készülék hátulján a LED lámpa világítani fog). Beszéljen egyenesen a mikrofonba (a készülék hátulján, a jobb felső sarokban a LED lámpa felett), normális hangerővel kb. 10 cm-es távolságból.
3. A felvétel befejezésekor engedje el a felvétel gombot. Amennyiben a felvétel túl halk, kérem, ismétlje meg a második lépést úgy, hogy közelebb hajol a mikrofonhoz.

**Hangfelvétel egyéb forrásból (CD lejátszó, MP3 lejátszó, számítógép)**

1. Állítsa a hangerőt a maximumra: a készülék hátulján, jobb oldalon található egy vízszintesen csíkozott tekerő (a hangerő szabályozó), amit tekerjen lefelé, míg megakad. Ezek után állítsa a készülék bal felső sarkában található csúszkát a REC (felvétel) pozícióba, ami a bal sarok (a jobb sarok a lejátszás állás).

2. Egy 3,5 mm-es jack dugójú audio kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszó fejhallgató bemeneti végét a készülék audio in bemenetével (ami a készülék hátulján a jobb alsó sarokban található lyuk).  
Figyelem, a kábel nem tartozéka a készüléknek!
3. Amint a lejátszó audio ahhoz a részhez ér, amit rögzíteni szeretne a készülékére, nyomja meg és tartsa nyomva a felvétel gombot (a felvétel ideje alatt a LED világítani fog).
4. Engedje el a gombot a felvétel befejezéséhez.

### **Automatikus visszajátszás**

1. Állítsa a REC/Play kapcsolót a Play (lejátszás) üzemmódba. A mozgásérzékelő ez által bekapcsol és lejátsza az üzenetet.
2. A szenzor kb. 2 méterig érzékeli a mozgást 100 lux erősségű környezeti fény mellett.

### **Ötletek a használathoz**

#### **Otthon:**

- helyezze a bejárati ajtóhoz, hogy emlékeztesse azokra a dolgokról, amiket gyakran elfelejt, mint pl. kulcsok, szemüveg, pénztárca stb.
- hagyjon üzenetet a családtagjainak mire hazaérnek, pl. „be tudnád kapcsolni a sütőt, hogy bemelegedjen?”

#### **Lakónegyedben:**

- helyezze a készüléket a főkapuhoz, hogy a nap eseményeit reklámozza
- rakja az ebédlőbe vezető ajtóhoz, hogy a napi menüt hangoztassa
- használja veszélyekre történő figyelmeztetésként.
- Emlékeztetiesben szenvedőknek vagy rövid memóriával rendelkezőknek kiváló emlékeztető lehet, pl. „jusson eszembe bevenni a gyógyszerem 10 órakor, 12 órakor és este 7 órakor.”

#### **Munkahelyen:**

- használja balesetek elkerülése érdekében: csúszik a padló, létra van a folyosón vagy villástargoncákat alkalmaznak a raktárban
- rögzítse a napi menüt és helyezze az ebédlő bejáratához

#### **Iskolában:**

- rögzítse az órarendjét, majd helyezze a készüléket az ajtóhoz
- helyezze a kivetítőhöz és rögzítse a hangeffekteket vagy a kivetített képhez tartozó magyarázatot