

Szemfelügyelő

DH112

A Szemfelügyelő használata

1. Állítsa függőlegesen a Szemfelügyelőt és húzza hátra a szemvédőt.
2. Távolítsa el a szemcseppentő kupakját és zárja vissza a szemvédőt.
3. Üljön le egy székre, döntse hátra a fejét és helyezze a Szemfelügyelőt a szeme közepére. Az ujjja segítségével húzza le az alsó szemhéját. Óvatosan nyomja meg a Szemfelügyelőt.
4. Nyissa ki a szemvédőt és helyezze vissza a szemcseppentő kupakját.

Az szemcseppentő behelyezése

Amennyiben a szemcseppentő új, lazítsa meg a kupakot, hogy eltörjön a pecsét, majd finoman csavarja vissza a kupakot.

1. A hüvelykujjnak kifejlesztett fülek segítségével nyissa ki a Szemfelügyelőt.
2. Egy határozott mozdulattal pattintsa be a szemcseppentőt a nyak és a váll találkozásához, úgy hogy azok szorosan körülöleljék az üveget. (Előfordulhat, hogy némelyik szemcseppentőnél szüksége lesz a nyakörvre, hogy az üveg biztosabban illeszkedjen a Szemfelügyelőbe. A mellékelt nyakörvet az üveg nyakára kell helyezni.)
3. Csukja be a Szemfelügyelőt.

Figyelem!

A Szemfelügyelő tökéletesen illeszkedik mind az orvosi receptre kapható szemcseppekhez, mind az ovális alakúakhoz.

Szemfelügyelő

Kimunkálása segít az időseknek összenyomni az üveget.

Jól mutat, kényelmesen használható és növeli a használó magabiztosságát.

Pontosan illeszkedik a szemre, így nem kell attól félni, hogy a szemcseppentő hegye beleér a szembe.

A szemvédőn ki van hagyva egy kis rész az ujjnak, hogy könnyedén le lehessen húzni az alsó szemhéjat.

A Szemfelügyelő tervezésénél a használat egyszerűsége volt a cél.

A készülék tisztántartásához rendszeresen áztassa be meleg vízbe. Kerülje minden lehetséges módját a fertőzések továbbításának. Ne adja át más személynek.

A Szemfelügyelő egy személynek készült.

A termék „gyógyszerész díjjal” kitüntetett.