

Tisztelt Vásárlók!

Köszönjük, hogy kitalatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászati, a masszáz és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat. Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizze meg a későbbi használatra, tegyék más használatok számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléssel
az Ön Beurer csapata

1. A készülék ismertetése

Ellenőrizze a Beurer BM 49 vérnyomásmérőt, hogy nem sértült-e a csomagolása és tartalma teljes-e. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek látható sérülések és minden csomagolóanyagot eltávolított. Kéres esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a Beurer ügyfélszolgálatához vagy a megadott szervizhez.

A felkari vérnyomásmérő készülék felhőkkel artériás vérnyomás értékeinek nem invazív mérése és ellenőrzésére szolgál.

Segítségével gyorsan és egyszerűen megmérheti vérnyomását, ellenőrizheti a mérések eredményét és megjelenítheti az értékek alakulását és átlagát. Esetleges szívritmusszavar esetén a készülék figyelmezteti Önt.

2. Fontos tudnivalók

⚠ Explicação dos símbolos

Nas instruções de utilização, na embalagem e na ficha de características do aparelho e dos acessórios são usados os seguintes símbolos:

	Vigyázat		Gyártó cég
	Fontos tudnivaló Utasítás fontos információkra		Megengedett tárolási hőmérséklet
	Vegye figyelembe a használati útmutatót		Megengedett tárolási páratartalom
	BF típusú alkalmazói rész		Nedvességtől óvni
	Egyenliram		Sorozatszám
	Ártalmatlanítás az Európai Uniónak az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelve szerinti		A CE-jelölés jelzi, hogy a készülék megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó 93/42/EGK irányelv alapvető követelményeinek.

⚠ Fontos tudnivalók az alkalmazáshoz

- Minidig azonos napszakokban mérje meg a vérnyomását, hogy összehasonlítható értékeket kapjon.
- Minden egyes mérés előtt kb. 5 percig helyezze nyugálmóba magát!
- Ha több mérés szeretne végezni egy személyen, akkor várjon 5-5 percet az egyes mérések között.
- A mérés előtt legkevesebb 30 percig ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon, és ne végezzen fizikai tevékenységet.
- Kétséges mért értékek esetén ismételje meg a mérést.
- A saját maga által megállapított mérési értékek csak a saját tájékoztatására szolgálnak – a mérések nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot. Beszélje meg a mért értékeket az orvosával, de ezek alapján semmilyen esetben se hozzon saját, egészségére vonatkozó döntéseket (pl. orvosságok kiválasztása és az adagolásiuk).
- Ne használja a vérnyomásmérő készüléket újszülötteknél és preeklampsziában szenvedő nőknél. Javasoljuk, hogy a vérnyomásmérő terheesség alatti használata előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A szív- és érrendszeri megbetegedések hibás méréseket, ill. a mérési pontosság csökkenését okozhatják. Ugyanez történhet nagyon alacsony vérnyomás, cukorbetegség, keringési és ritmusszavarok, valamint hidegrázás vagy remegés esetén.
- A vérnyomásmérő készüléket nagyfrekvenciás sebességszékkel együtt nem szabad használni.
- Csak olyan személyekneké alkalmazza a készüléket, akik felkarjának kerülete a készülékhez megadott tartományba esik.
- Vegye figyelembe, hogy felpumpálás közben korlátozódhat az érintett végtag működőképessége.
- A vérkeringést a vérnyomás mérése feleslegesen hosszú ideig nem akadályozhatja. A készülék hibás működése esetén vegye le a mandzsettát a karról.
- Kerülje el a mandzsettától mechanikus szűkülést, összenyomódását vagy megtörését.
- Kerülje el, hogy tartosan nyomás legyen a mandzsettában, és kerülje a gyakori méréseket. A véráram emiatt történő korlátozása sérüléseket okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegye olyan karra a mandzsettát, amelyben az artériák és a vénák orvosi kezelés alatt állnak, mint pl. intravaszkuláris hozzáférés, ill. intravaszkuláris terápia vagy artériás-venás (A-V-) szünt.
- Ne tegye a mandzsettát olyan személyekre, akiknél mellampatációt végeztek.
- Ne tegye a mandzsettát sebekre, mert ezzel további sérüléseket okozhat.
- A vérnyomásmérő készüléket elemekkel vagy hálózati energiával üzemeltetheti. Vegye figyelembe, hogy az adatok átvitele és tárolása csak akkor lehetséges, ha a vérnyomásmérő készülék áramot kap. Amint elhasználódnak az elemek, vagy leválasztotta a hálózati energiát, a vérnyomásmérő készülékből elveszik a dátum és az idő.
- Az automatikus kikapcsolás funkció az akkumulátorok kímélése érdekében kikapcsolja a vérnyomásmérőt, ha 1 percen belül egyetlen gombot sem nyom meg.
- A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem felel a szakszerűtlen vagy helytelen használatból származó károkokért.

⚠ Tárolási és ápolási tudnivalók

- A vérnyomásmérő készülék precíziós mechanikai és elektronikus alkatrészekből áll. A készülék által mért értékek pontosságára és a készülék élettartamára a gondos kezeléstől függ.
- Vedje a készüléket lökésektől, nedvességtől, szennyeződéstől, nagy hőmérsékletingadozásoktól és közvetlen napsugárzástól.
- Ne érse le a készüléket.
- Ne használja a készüléket erős elektromágneses mezők közelében, tartsa távoli rádiófrekvenciás berendezésektől vagy mobiltelefonoktól.
- Csak a készüléket együtt szállított vagy eredeti mandzsettákat használjon. Ellenkező esetben hibás mérési értékeket kap.
- Ne nyomja meg a gombokat, amíg nem helyezte fel a mandzsettát.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, akkor javasoljuk, hogy vegye ki belőle az elemeket.


△ Elemekkel kapcsolatos tudnivalók

- Az elemek helyeslése életveszélyt okozhat! Ezért az elemeket és a termékeket tartsa kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. Elem helyeslése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Az elemeket utánítóknak vagy más módon reaktíválni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha lemerültek, vagy ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket. Így elkerülheti az elemek kifolyásából származó károkat. Mindig egyszerre cserélje az összes elemet.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Elsősorban alkáli elemeket használjon.


i Javítással és ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók

- Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. Kérjük, hogy az erre a célra rendszerezett gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa a lemerült elemeket.
- Ne nyissa ki a készüléket. Ennek a figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.
- A készüléket nem szabad saját kezűleg javítani vagy beszabályozni. Ilyen esetben már nem biztosított a károgtálatlan működés.
- A javítást csak szakszervíz vagy egy arra felhatalmazott kereskedő végezheti. Reklamáció előtt azonban minden esetben ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.
- A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervezethez.

3. A készülék leírása

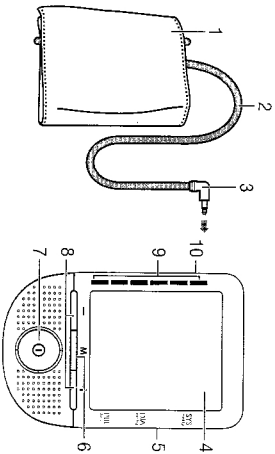

Kijelzések a kijelzőn:

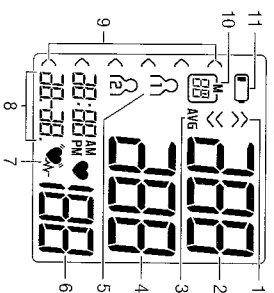


1. Mándzsetta
2. Mándzsettatömítő
3. Mándzsetta dugasz
4. Kijelző
5. Csatlakozó a hálózati egységhez
6. **M** memóriagomb
7. START/STOP gomb **Ⓢ**
8. **-/+** funkciógomb
9. WHO-skála
10. A mándzsetta dugasz csatlakozója

4. A mérés előkészítése


Az elem behelyezése

- Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- Helyezzen be négy 1,5V-os AA típusú elemet (alkáli, LR6). Feltehetően ügyeljen arra, hogy az elemek a jelöléseknek megfelelően, a helyes polaritással legyenek behelyezve. Ne használjon újratölthető akkumulátorokat. Elhangzik a „A gép készen áll. Elkezdhetsz a mérést.” bejelentés.
- Csúgya vissza gondosan az elemtartó rekesz fedelét.
- Behelyezett elemekkel a készülék folyamatosan mutatja a pontos időt és a dátumot.

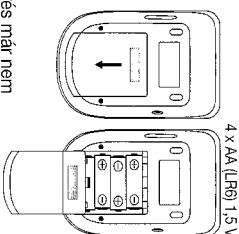

Ha a kijelzőn megjelenik az elemcsere és a **CE** szimbólum, úgy több mérés már nem lehetséges. A készülék bemozdja: „Akkusztint alacsony.” Cserélje ki az összes elemet. Ha kivette az elemeket a készülékből, akkor újra be kell állítania a dátumot és az időt. Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. Ártalmatlanítsa őket az elektromos szakkereskedőn keresztül vagy a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen. Erre törvény kötelezi Önt.

Megjegyzés: A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek: Pb: az elem ólmot tartalmaz. Cd: az elem kadmiumot tartalmaz. Hg: az elem higanyt tartalmaz.

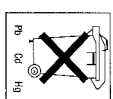

Dátum, idő és nyelv beállítása

Ebben a menüben egymás után, egyenként a következő funkciókat állíthatja be.

Dátum → Idő → Nyelv → Hangzó

A dátumot és az időt feltétlenül be kell állítania. Csak így lárolhatja el és hívhatja be később a mérési eredményeket a helyes dátummal és idővel együtt.

Az idő 24 órás formátumban jelenik meg.

A készülék 4 nyelvű. A kiszállításkori állapotban a készülék román nyelvre van beállítva.

i Ha megnyomva tartja a **-/+** gombot, akkor gyorsabban beállíthatja az értékeket.

Bemondott szöveg

A gép készen áll. Elkezdhetsz a mérést.

- Helyezze be az elemeket vagy tartsa lenyomva a **M** memóriagombot 5 másodpercig.
- A kijelzőn villog az évszám.
- A **-/+** funkciógombokkal állítsa be az évet, majd nyugtázza az **M** memóriagombbal.
- Állítsa be a hónapot, a napot, az órát és a percet, majd minden esetben nyugtázza az **M** memóriagombbal.

A kijelzőn villog a **L** nyelv kijelzése.

• A **-/+** funkciógombokkal a következő nyelvekből választhat:

- **L** = román
- **L2** = lengyel
- **L3** = cseh
- **L4** = magyar
- **L5** = nyelv kikapcsolása

Erősítse meg a választását az **M** gombbal.

i **L5** = A nyelv kikapcsolása azt jelenti, hogy bemondott szöveg és akusztikus visszajelzés nem lesz hallható.

Română
Polski
Česky
Magyar

Bemondott szöveg

- A kijelzőn villog a **Vo** nyelv kijelzés.
- A **-/+** funkciógombokkal beállíthatja a kiválasztott nyelv hangerejét:
 - Vo3** = hangos
 - Vo2** = közepes
 - Vo1** = halk
- Erosítse meg a választását az **M** gombbal.

Üzemelés hálózati egységgel

- Hálózati egységről is üzemeltetheti ezt a készüléket. Ebben az esetben nem lehetnek elemek az elemtároló rekeszben. A hálózati készülék 071.60 számon rendelkezhető meg a szakkereskedelemben vagy a szerviz címén.
- A vérnyomásmérő készülék kizárólag az itt leírt hálózati egységgel üzemeltethető, a vérnyomásmérő lehetséges károsodásának elkerülése végett.
 - Csatlakoztassa a hálózati egységet a vérnyomásmérő erre a célra szolgáló jobb oldali csatlakozójára. A hálózati egységet csak a típus táblán megadott hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.
 - Ezután csatlakoztassa a hálózati egység dugaszát az aljzatba.
 - A vérnyomásmérő használata után először az aljzatról húzza ki a hálózati egységet és csak ezt követően a vérnyomásmérőtől. Amint leválasztja a hálózati egységet, a vérnyomásmérő elveszti a beállított dátumot és időt. A tárolt mérési értékek azonban megőrződnek.

5. Vérnyomás mérése


Használat előtt várja meg, hogy a készülék felvegye környezete hőmérsékletét.

A mandzsetta felhelyezése

- Helyezze a mandzsettát a karra úgy, hogy a felkar csupasz bal felkarjára. Túl szoros ruhadarab vagy más hasonló ne akadályozza a kar vérellátását.

A tömlő nézzon a tenyér közepe felé.

- Most vezesse a mandzsettát szabad végét szorosan, de nem túl szorosan a kar körül, és hajtsa rá a tépőzárát. A mandzsetta csak annyira fektüdjön fel, hogy még két ujj beférjen a mandzsetta alá.

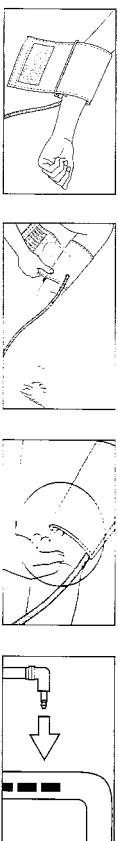

Figyelem: A készüléket csak az eredeti mandzsettával szabad használni. A mandzsetta 22 cm és 36 cm közötti kerületű karoknál használható.

Nagyobb, 35 és 45 cm közötti kerületű karokhoz a 163.387. számú rendelhető nagyobb mandzsettát a szakkereskedelemben vagy a szerviz címén.

Vegyén fel helyes testtartást

- Minden mérés előtt kb. 5 percig pihenjen. Ellenkező esetben eltérések fordulhatnak elő.
- A mérés ülő vagy fekvő helyzetben végezhető. Mindkét esetben ügyeljen arra, hogy a mandzsetta színmagasságban helyezkedjen el.
- Üljön kényelmesen a vérnyomás méréséhez. Támassza meg a hátát és a karját. Ne tegye keresztbe a lábait. Helyezze vízszintes helyzetbe a lábféleit a padlóra.
- Ne legyen fontos, hogy mérés közben nyugodtan viselkedjen és ne beszéljen, hogy ne hamisítsa meg a mérési eredményeket!



Memória kiválasztása

- A **START/STOP** gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
 - Kikapcsoló állapotban az idő és a dátum folyamatosan megjelenik.
 - Válassza ki a kívánt felhasználói memóriát a **-/+** funkciógombok megnyomásával.
- A 2 darab, egyenként 60 memóriahellyel rendelkező memória segítségével 2 különböző személy mérési eredményei tárolhatók egymástól függetlenül.

Felhasználói memória 1
Felhasználói memória 2

Vérnyomásmérés

- A fentiek szerint helyezze fel a mandzsettát és vegye fel azt a testtartást, melyben a mérést el kívánja végezni.
- A **START/STOP** gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A kijelző ellenőrzésére kerül ügy, hogy minden kijelző-szegmens felvilágosuljon.
- A **START/STOP** gomb megnyomásával indítsa el a vérnyomásmérő készüléket. Megjelenik a tárolásra szánt memóriahely.
- A készülék a mandzsettát 190 mmHg-re pumpálja fel. A mandzsettából lassan leenged a légnyomás. Magas vérnyomás gyanúja esetén a készülék tovább pumpál, és tovább fokozza a mandzsettanyomást. Amint felismerhető a pulzus, villogni kezd a szív szimbólum.

Bemondott szöveg bekapcsolt nyelvfüktionál
A gép készen áll. Elkezdheti a mérést.

- A mérést a **START/STOP** gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja.

Bemondott szöveg bekapcsolí
nyelvfunkcionál
Szisztolés nyomás ... Hgmm
Diastolés nyomás ... Hgmm
Pulzusszám ... ütés percenként
Az Egészségügyi Világszervezet
irányelvei alapján az ön vérnyo
mása:
– optimális
– normális
– Emelkedett-normális
– Enyhe hipertónia
– Képesülős hipertónia
– Súlyos hipertónia

i A berrondás alatt a hangeroi a -/+ funkciogombokkal változtat-hatja meg.

- E jelenik meg, ha a méreést nem sikerült szabályszerűen elvégezni.
- Kérjük, olvassa el a jelen használati útmutató Hibaüzenet/hibaelhárítás című fejezetét, majd ismételje meg a méreést.
- A készülék automatikusan tiltózik a méreés eredményt.
- A készülék 1 perc után automatikusan kikapcsol.

Új mérés elvégzése előtt várjon legalább 5 percig!

6. Az eredmények kiértékelése

Szívitmus zavarok:

[illegible]

WHO-besorolás:

WHO-besorolás:
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei/határozatai szerint a mérési eredményeket a következő táblázat alapján kell besorolni és nyilvántartani

Vérnyomás-értékartomány	Szisztolés (mmHg)	Diastolés (mmHg)	Trendő
3 fokozat: nagyon magas vérnyomás:	160 / 95	100-109	forduljon orvoshoz
2 fokozat: közepesen magas vérnyomás:	140 / 90	90-99	forduljon orvoshoz
1 fokozat: kissé magas vérnyomás:	130 / 85	85-89	rendszeres orvosi kontroll
Magas Normál	120 / 80	80-84	ellenőrzés
Normális	120 / 80	80	ellenőrzés

A kijelzőn az oszlopdiaagram és a készüléken levő skála azt mutatja, hogy a megállapított vérnyomás melyik tartományban van. Ha a szisztolés és diasztolés értékek két különböző WHO-tartományba esnek (pl. szisztolé a magas tartományba és a diasztolé a normál tartományba), úgy a készüléken a grafikus WHO-beosztás mindig a magasabbba és a diasztolé a „Magas Normál” tartományt mutatja. A példában a „Magas Normál” tartományt mutatja.

7. A mérési eredmények tárolása, lekérdezése és törlése

i A bemondás alatt a hangerőt a **-/+** funkciógombokkal változtathatja meg

Bemondott szöveg bekapcsolt
nyelvfunkciónál

A készülék minden sikeres mérés eredményeit dátummal és időponttal együtt eltárolja. Ha a mérési adatok száma meghaladja a 60-at, akkor a mindenkori legrégebbi adatok elvesznek.

- A **START/STOP** gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.

- Válassza ki a kívánt felhasználói memóriát ($\beta_1 \dots \beta_n$) a $-/+$ funkció gombok megnyomásával.

- Nyomja meg a **M** memóriagombot. Először ennek a felhasználó memóriának az összes mérési értékének az átlagértéke **AVG** jelenik meg.
- A **M** memóriagomb megnyomására az utolsó 7 nap reggeli mérés

seinek állagértéke jelenik meg (Reggel: 5.00 óra – 9.00 óra, kijelzés AM).

- **A M** memóriagomb megnyomására az utolsó 7 nap esti méréseinek átlagértéke jelenik meg (Este: 6.00 óra – 8.00 óra, kijelzés **PM**).

- Az **M** memóriagomb újbóli megnyomására a mindenkori utolsó envedi értékek jelennek meg dátummal és idővel együtt.

A gép készen áll. Elkészítheti a mérést.

Felhasználói memória 1
Felhasználói memória 2

Átlagérték:

Szisztorús nyomás ... Hgmm
Diasztolés nyomás ... Hgmm
Pulzusszám ... ütés/percenkénti

Az Egészségügyi Világszervezet
írásai/velei alapján az ön vérnyo-
mása ...

Memóriahely ...

Szisztolés nyomás ... Hgmm
Diasztolés nyomás ... Hgmm
Pulzusszám ... ütés/percenként
Az Egészségügyi Világszervezet
irányelvei alapján az ön vérnyo-
mása ...

Minden érték a memóriatárból
törölve

- A mindenkori felhasználói memória töréséhez először kapcsolja be a készüléket. Válassza ki a kívánt felhasználói memóriát. Tartassa egyidőre le a gombja a - és a + funkciógombokat 5 másodpercig.
- Ezután a készülék közvetlenül készenlét üzemmódba (óra üzemmód) kapcsol.

8. Hibautózat/hibaelhárítás

Hiba esetén a kijelzőn a E_ hibaüzenet látható.

Hibaízenetek jelenhetnek meg, ha

1. nem lehető megállapítani pulzust (E^1),
2. ön mozog vagy beszélt mérés közben (E^2),
3. túl szorosan vagy túl lazán van felhelyezve a mandzsetta (E^3)

4. hibák lépnek fel mérés közben (E⁴).
5. a pumpázási nyomás nagyobb, mint 300 mmHg (E⁵).
6. az elemek  majdnem teljesen lemerültek (E⁶).

Ilyen esetekben ismételje meg a mérést. Ügyeljen arra, hogy ne mozogjon és ne beszéljen. Szükség esetén helyezze be újabb vagy cserélje ki az elemeket.

9. A készülék tisztítása és tárolása

- Óvatosan, csak kissé benedvesített kendővel tisztítsa meg a vérnyomásmérőt.
- Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.
- Semmilyen esetben sem szabad víz alá tartania a készüléket, mert víz juthat be, és károsíthatja.
- Tároláskor ne helyezzen súlyos tárgyat a készülékre. Vegye ki az elemeket. A mandzsettát óvatosan tárolja.

10. Műszaki adatok

Modellszám	BM 49
Mérési eljárás	Oscillometrikus, nem invazív vérnyomásmérés a felkaron
Mérestartomány	mandzsettanyomás 0–300 mmHg, szisztolés 50–250 mmHg, diasztolés 30–200 mmHg, pulzus 30–180 verés/perc
A kijelzés pontossága	szisztolés ± 3 mmHg, diasztolés ± 3 mmHg, pulzus a kijelzett érték $\pm 5\%$ -a
Mérési bizonytalanság	max. megengedett standard eltérés klinikai vizsgálat szerint: szisztolés 8 mmHg/diasztolés 8 mmHg
Memória	2 x 60 memóriahely
Méret	H 145 mm x Sz 96 mm x M 60 mm
Súly	megközelítőleg 264 g (elemek nélkül)
Mandzsetta mérete	22 – 36 cm
Megengedett üzemi feltételek	+5 °C – +50 °C, $\pm 85\%$ relatív páratartalom (nem kondenzáló)
Megengedett tárolási feltételek	-20 °C – +50 °C, $\pm 85\%$ relatív páratartalom 800–1050 hPa környezeti nyomás
Aramellátás	4 x 1,5 V-os AA elem (alkáli LR6)
Elemek élettartama	Kb. 250 méréshez a vérnyomás nagyságától, ill. a pumpázási nyomástól függően
Ismeretlenség	Használati útmutató, 4 x 1,5 V AA elem, tároló táskák
Összefoglalás	Belső tápellátás: II-XU, nikk AP vagy APG, folyamatos üzemi, BF típusú alkalizáló rész

Aktualizálási célú műszaki változtatások joga előzetes értesítés nélkül fenntartva.

- Ez a készülék megfelel az EN60601-1-2 európai szabványoknak, és az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális rendszabályoknak tesz eleget. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hordozható és mobil nagyfrequenciás kommunikációs eszközök keszvetlenlenti hatókövetésolhatják a készülék működését. Fontosabb adatokat az ügyfélszolgálati megközelítéssel lehet elérni, vagy olvassa el a használati útmutató végén lévő részt.
- Ez a készülék megfelel a gyógyászati termékek vonatkozó 93/42/EK európai uniós irányelvnek, a gyógyászati termékek vonatkozó törvénynek és az I N 1040 1 (nem invazív vérnyomásmérő készülékek, 1. rész: Általános követelmények), az EN 1063 3 (nem invazív vérnyomásmérő készülékek, 3. rész: Kiegészítő követelmények elektromechanikus vérnyomásmérő rendszerekhez) és az IEC80601-2-30

(Gyógyászati elektromos készülékek, 2–30. rész: Automatikus, nem invazív vérnyomásmérők alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei) szabványoknak.

- Ezen vérnyomásmérő készülék pontosságát gondosan bevizsgálták, és a készüléket hosszán tartó használatra fejlesztették ki. A készülék gyógyászati célú alkalmazása esetén megfelelő eszközökkel méresterminál ellenőrzéseket kell végezni. A pontosság ellenőrzésével kapcsolatban részletesebb információk a szerviz címén kérhetők.

11. Adapter

Modellszám	FW 757SM/EU/6/06
Bemenet	100–240V, 50–60 Hz
Kimenet	6V DC, 600 mA, csak a Beurer vérnyomásmérő készülékekkel kapcsolható össze.
Gyártó	Frivo Gerätebau GmbH
Védelem	A készülék kettős védőszigetelésű és primeroldali hibabiztosítékkal rendelkezik, amely hiba esetén a készüléket leválasztja a hálózatról. Győződjön meg róla, hogy az elemeket kivette az elemtartó rekeszből, mielőtt használja az adaptert.
	Az egyenfeszültségű csatlakozás polaritása
	Védőszigetelésű/Védelmi osztály: 2
Ház és védőburkolatok	Az adapterház megvéd az olyan alkatrészek megérintésétől, amelyek áram alatt vannak, vagy lehetnek (ujjak, tü. vizsgáló kárpó). A felhasználónak nem szabad egyidejűleg megérintenie a páciens és az AC-adapter kimenő csatlakozó dugóját.